

TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA – PTT

Descripción

Campos meta

Utilidad Clínica :

Como parte de una investigación de un episodio de sangrado o de un episodio trombótico; para monitorizar el tratamiento anticoagulante con heparina estándar (no fraccionada). Como parte de un estudio preoperatorio.

Preparacion Del Paciente :

Preferiblemente en ayunas.

Tiempo Entrega Resultados : Diario

Dias De Procesamiento : Diario

Interferencias :

Hemolisis y lipemia.

La punción debe ser sin ningún tipo de trauma para evitar la activación de la coagulación por la tromboplastina tisular.

Estabilidad Y Preparacion :

2 horas a 20-22°C. 2 semanas a –20°C.

Tomar la muestra, centrifugar, separar el plasma y congelar inmediatamente.

Tipo De Muestra :

Plasma citratado – 1 mL

Sinonimo :

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada, TTP

Examen : TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA - PTT